

ORTHÈSE POIGNET POUCE SOUPLE D'ACTIVITÉ QUERV'ACTIV™



MAINTIEN LE POUCE
ET ACCOMPAGNE LE MOUVEMENT

**DÉCOUPE
ERGONOMIQUE**
> Facilite la
mise en place.



**PATRONNAGE
SPÉCIFIQUE**

> Maintien du pouce
en position de repos.

MODULE SÉCURISANT

> Crée une présence
rassurante.

INSERTS EN GEL

> Évite les
surpressions.

INDICATIONS :

Le port de l'orthèse souple d'activité QUERV'ACTIV™ est préconisé lors de vos activités quotidiennes en cas de ténoosynovite de De Quervain, de tendinite et de troubles musculo-squelettiques du pouce.

CONTRE-INDICATIONS :

L'orthèse ne doit pas être mise en contact avec une lésion cutanée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Déconseillée lors d'une utilisation prolongée sur clavier. Ne pas utiliser à côté d'une flamme ou d'un corps incandescent.

SPÉCIFICITÉS :

L'orthèse souple EPITACT® limite les micro-mouvements traumatisants et maintient le pouce en position de repos tout en conservant l'entière fonctionnalité de la main. Les inserts en gel en forme de haricots permettent d'éviter les surpressions à la jonction du poignet et du pouce.

ERGONOMIE :

Grâce à son tissu technique, fin, et à son patronnage spécifique épousant le galbe de la main, l'orthèse souple apporte une présence sécurisante et un confort optimal. La mise en place est facilitée par le débord de tissu en forme de vague. Conçue pour s'adapter aux contraintes de la vie quotidienne, QUERV'ACTIV™ n'intègre aucun « scratch » agressif risquant d'abîmer les vêtements.

DURÉE DE VIE :

Lavable en machine dans le filet de lavage fourni, elle a une longue durée d'utilisation (plusieurs mois).

COMPOSITION : 83% Tissu (Polyamide, Elasthanne, Polyuréthane), 17% Silicone.

Les matériaux ont fait l'objet d'une évaluation de la biocompatibilité selon la norme ISO 10993-1. Si un incident se produisait, il conviendrait de cesser immédiatement l'utilisation et de prévenir la société MILLET Innovation. La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant. Le français est la langue de référence. Marquage CE initial : 2021.



Lavable en
machine à 30°C



Pas de repassage,
ni de vapeur.



Pas de
nettoyage à sec.



Pas de chlorage.



Pas de séchage
en machine.



Voir emballage.

Produit issu de la recherche MILLET Innovation.



MILLET Innovation ZA Champgrand
26270 Lorial/Drôme - FRANCE

MILLET
INNOVATION

www.epitact.com