

SOEPELE DUIMBRACE VOOR ACTIVITEITEN QUERV' ACTIV™



BIJ DE BEWEGING VAN DE POLS EN DE DUIM



INDICATIES: Heeft u last van het syndroom van De Quervain, tendinitis, een spier- of skeletaandoening of peesontsteking aan de duim? Dan raden wij u aan om de QUERV'ACTIV™ te dragen tijdens uw dagelijkse activiteiten.

CONTRA-INDICATIES: De orthese mag niet rechtstreeks in contact komen met een huidletsel. Niet gebruiken in de buurt van een vlam of gloeiend voorwerp.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK: Wordt afgeraden bij het langdurig gebruik van een toetsenbord.

BIJZONDERE KENMERKEN: De soepele EPITACT® orthese beperkt schadelijke microbewegingen en houdt de duim overdag in rustpositie, terwijl u uw hand wel nog volledig kunt gebruiken. De boonvormige gel-inzetstukjes voorkomen dat er te veel druk wordt uitgeoefend op de verbinding tussen de pols en duim.

ERGONOMIE:

De soepele orthese werkt beschermend en biedt optimaal comfort dankzij het technische textiel en het specifieke patroon dat de welving van de hand volgt. De golfvormige textielboord zorgt ervoor dat de orthese ook gemakkelijk over de hand kan worden geschoven. De QUERV'ACTIV™ orthese werd ontworpen met het oog op een optimaal gebruiksgemak en bevat geen scherpe onderdelen die de kledij zouden kunnen beschadigen.

LEVENSDUUR:

De orthese heeft een lange levensduur (meerdere maanden) aangezien ze in het meegeleverde netje in de wasmachine gewassen kan worden.

SAMENSTELLING: 83% (polyamide/elastaanweefsel, Polyurethaan), 17% silicone

De materialen werden beoordeeld op hun biocompatibiliteit volgens ISO-norm 10993-1. Indien er zich alsnog een probleem zou voordoen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en breng MILLET Innovation op de hoogte. Het bedrijf MILLET Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het product niet volgens de aanbevelingen van de fabrikant wordt gebruikt. De referentietaal is het Frans. Initiële CE-markering: 2021.



Wasbaar in de wasmachine à 30°C



Niet strijken of stomen.



Geen chemische reiniging.

Product ontwikkeld door MILLET Innovation.



Geen bleekmiddel gebruiken.



Niet in de droogkast.



Zie verpakking.



MILLET Innovation ZA Champgrand
26270 Lorio/Drôme - FRANKRIJK

MILLET
INNOVATION

www.epitact.be