

KNIEBANDAGE GEWRICHTSBANDEN



ONDERSTEUNT, STABILISEERT EN ONTLAST DE KNIE

**SOEPELE
LATERALE
BALEINEN**
> Stabilisering
van de knie.

**ADEMEND
WEEFSEL**
> Afvoer van
transpiratie.

**GEEN ONGEMAK
OF IRRITATIE**
> Gepatenteerd
siliconen kussentje
aan de knieholte.

GLIJDT NIET AF
> Elastische
siliconen band.

**ELASTISCH
3D-TRICOT**
> Ondersteuning
van de knie.

GEEN DRUK
> Decompressieweefsel
ter hoogte van
de knieschijf.

INDICATIES:

Het dragen van de EPITACT® kniebandage voor de gewrichtsbanden wordt aanbevolen bij letsels aan de kniegewrichten of bij matige verrekkingen. Deze bandage is aangewezen als nabehandeling voor ernstige verrekkingen van de knie, beschadigingen van de knie door verrekking of instabiliteit van de knie.

CONTRA-INDICATIES:

Niet gebruiken bij arteritis, ernstige spataders, flebitis of oedeem in de benen (lymfatisch/veneus) en/of dijen, om te vermijden dat de bloedcirculatie wordt belemmerd. Niet gebruiken op een huidletsel.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK:

Wij raden u aan om de bandage te wassen vóór het eerste gebruik. Om ervoor te zorgen dat de bandage altijd perfect blijft zitten is het belangrijk dat het silicone-oppervlak van de elastische band na elk gebruik met water en zeep wordt schoongemaakt. Niet gebruiken in rusttoestand (dus enkel wanneer u beweegt). In geval van twijfel, vraag raad aan uw arts, apotheker of medisch personeel. Dit medisch hulpmiddel is een gezondheidsproduct dat aan de Europese wetgeving is onderworpen en van het CE-label is voorzien. De conformiteitsbeoordeling werd uitgevoerd door ASQUAL.

BIJZONDERE KENMERKEN:

Het elastisch 3D-tricot boven de knie werkt als een strap dankzij de dichtheid van de mazen in het textiel. Het weefsel oefent een lichte druk uit die de zintuiglijke waarneming (proprioceptie) van het gewricht verbetert waardoor de stabiliteit van de knie wordt bevorderd. De zijdelingse soepele baleinen versterken de ondersteuning van de knie.

ERGONOMIE:

Dankzij de elastische siliconen band ter hoogte van het dijbeen blijft de bandage goed zitten en het gepatenteerde kussentje achteraan de knie (aan de knieholte) zorgt ervoor dat de bandage geen ongemak of irritatie veroorzaakt. De knieschijf wordt beschermd tegen druk dankzij een decompressiezone in het textiel en het ademende weefsel zorgt voor een optimale afvoer van transpiratie en voor nog meer comfort. De EPITACT® kniebandage voor de gewrichtsbanden kan zowel aan de linker- als rechterknie worden gedragen.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Wanneer u als sporter na een letsel uw activiteit opnieuw wilt opnemen, dan raden wij u de PHYSIOstrap® Sport aan om uw kwetsbare knie te beschermen.

ONDERHOUD:

Met de hand wassen op 30°C, met een niet-agressieve zeep en zonder reinigings- of bleekmiddel. Goed spoelen. Met de hand uitwringen. Niet blootstellen aan een directe warmtebron (verwarmingstoestel, zonlicht). Geen vlekkenverwijderaars gebruiken.

SAMENSTELLING: 68,9% textiel (polyamide, elastaan, polyester), 26,6% aluminium, 4,5% silicone.

De materialen werden beoordeeld op hun biocompatibiliteit volgens ISO-norm 10993-1. Indien er zich alsnog een probleem zou voordoen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en breng MILLET Innovation op de hoogte. Het bedrijf MILLET Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het product niet volgens de aanbevelingen van de fabrikant wordt gebruikt. De referentietaal is het Frans. Initiële CE-markering: 2017.



Wasbaar met de hand.



Niet strijken of stomen.



Geen chemische reiniging.



Geen bleekmiddel gebruiken.



Niet in de droogkast.



Zie verpakking.

Product ontwikkeld door MILLET Innovation.



MILLET Innovation ZA Champgrand
26270 Lorioi/Drôme - FRANCE

MILLET
INNOVATION

www.epitact.be

N19453BE-NL-A
01/2018