

RIGIDE RUSTORTHESE VOOR DE DUIM EN DE POLS QUERV'IMMO™



IMMOBILISEERT EN ONTLAST DE DUIM EN DE POLS



INDICATIES: Heeft u last van het syndroom van De Quervain, tendinitis, een lichte verstuiking, spier- of skeletaandoening of een peesontsteking aan de duim of pols? Dan raden wij u aan om de QUERV'IMMO™ rustorthese te dragen, zowel 's nachts als in alle situaties waarin u uw hand niet gebruikt.

CONTRA-INDICATIES: De brace mag niet rechtstreeks in contact komen met een huidletsel.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK: Lees aandachtig de informatie in de bijsluiters voordat u de enkelbandage gebruikt. In geval van twijfel, vraag raad aan uw arts, apotheker of medisch personeel. Dit medisch hulpmiddel is een gezondheidsproduct dat aan de Europese wetgeving is onderworpen en van het CE-label is voorzien.

BIJZONDERE KENMERKEN: De EPITACT® orthese is uiterst licht en past zich aan uw duim en pols aan. Dankzij zijn semi-rigide anatomische verstevigingen wordt uw pols in een comfortabele rustpositie gehouden. De verstelbare band is ontworpen om de orthese gelijkmatig rond de pols te laten aansluiten, zonder te veel druk uit te oefenen.

ERGONOMIE: De QUERV'IMMO™ orthese biedt optimaal comfort dankzij de verstevigingen die zich perfect aan de vorm van uw hand aanpassen. De orthese is zo licht en fijn dat u er tijdens het dragen geen last van ondervindt, zelfs 's nachts niet. De orthese heeft een wijde opening zodat ze vlot over de hand kan worden geschoven. Ook de sluiting rond de duim is verstelbaar.

ONDERHOUD: Met de hand wassen op 30°C, met een niet-agressieve zeep en zonder reinigings- of bleekmiddel. Goed spoelen. Met de hand uitwringen. Niet blootstellen aan een directe warmtebron (verwarmingstoestel, zonlicht). Geen vlekkenverwijderaars gebruiken.

SAMENSTELLING : 52% textiel (Polyamide, Elastaan, Polyurethaan), 46% TPE thermovormbare kunststof, 2% Metaal

De materialen werden beoordeeld op hun biocompatibiliteit volgens ISO-norm 10993-1. Indien er zich alsnog een probleem zou voordoen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en breng MILLET Innovation op de hoogte. Het bedrijf MILLET Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het product niet volgens de aanbevelingen van de fabrikant wordt gebruikt. De referentietaal is het Frans. Initiële CE-markering: 2021.



Wasbaar met de hand.



Niet strijken of stomen.



Geen chemische reiniging.



Geen bleekmiddel gebruiken.



Niet in de droogkast.



LOT Zie verpakking.

Product ontwikkeld door MILLET Innovation.



MILLET Innovation ZA Champgrand
26270 Lorio/Drôme - FRANKRIJ



MILLET
INNOVATION

www.epitact.be